

Gebruikersinstructie RECA fem vaginaal tampon

Pelvitec



- Was uw handen goed.
- Haal de folie van de tampon af.
- Dompel de RECA fem tampon gedurende minimaal 1 minuut in handwarm water. Dit maakt de tampon zacht.
- Knijp de tampon daarna voorzichtig uit.
- Ga in een comfortabele en ontspannen houding zitten of liggen (op uw rug met uw knieën gebogen of zittend op een toilet of staande met één voet op een stoel).
- Breng de tampon diep in de vagina. Bij een onprettig gevoel kunt u de tampon met de vingertoppen in een positie brengen die meer comfortabel aanvoelt.
- De tampon is te verwijderen middels het touwtje.
- Het touwtje om de tampon te verwijderen kan desgewenst worden vastgeplakt met een huidvriendelijke pleister.
- U hoeft de tampon niet te verwijderen bij een toiletbezoek.
- De tampon kan tot maximaal **12 uur** blijven zitten.
- Gebruik de tampon **niet** tijdens de menstruatie.
- Tijdens zwemmen mag de tampon blijven zitten.

De tampon niet gebruiken bij:

- Bloedingen zonder duidelijke oorzaak.
- Acute infecties in het gebied van de vagina.
- Onbekende pijn in de buik.

Neven effect:

Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van de tampon een licht drukgevoel ervaart. Normaal gesproken verdwijnt dat gevoel na 3-4 dagen gebruik of na verwijderen van de tampon.

Waarschuwing:

Indien u tijdens het gebruik van de tampon symptomen heeft als koorts, diarree, overgeven, duizeligheid en/of huiduitslag, verwijdert u de tampon dan direct en neem contact op met uw huisarts.

De tampon is geschikt voor éénmalig gebruik.

Wegwerpen:

Spoel RECA fem niet door het toilet. De tampon mag, eventueel gerold in toiletpapier of tissue, worden afgevoerd met het huishoudelijk restafval.



Lees deze instructie zorgvuldig.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij onzorgvuldig gebruik van dit product.



Eenmalig gebruik



Fabrikant:
RECA MED
Gustav-Schickedanz-Str. 8
90762 Fürth
Germany

In Nederland verkocht door:
Pelvitec B.V.
Rotterdamseweg 183-C
2629 HD Delft
Tel.: 010 - 303 22 90
Internet: www.pelvitec.com

FRM-3-016-03