


Gebruikersinstructie RECA care anaal tampon

Pelvitec

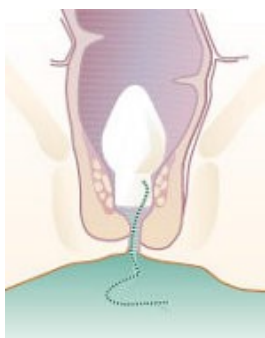

Het geleverd model kan afwijken van deze afbeelding.



- Was uw handen goed.
- Haal de folie van de tampon af.
- Dompel de RECA care tampon gedurende minimaal 1 minuut in handwarm water. Dit maakt de tampon zacht.
- Knijp de tampon daarna voorzichtig uit.
- Indien gewenst een glijmiddel aanbrengen op de tampon. Breng tevens glijmiddel aan op de punt van de inbreng staaf (zodat de tampon na inbrengen makkelijk van de staaf loskomt).
- Plaats de RECA care tampon op de inbreng staaf.
- Ga in een comfortabele en ontspannen houding zitten of liggen (op uw rug met uw knieën gebogen of zittend op een toilet of staande met één voet op een stoel).
- Breng de tampon in het rectum en verwijder de inbreng staaf.
- Als er een knijp reflex optreedt wacht dan 8 to 10 sec. tot het rectum zich weer ontspant en verwijder dan de inbreng staaf.
- De tampon is te verwijderen middels het touwtje.
- Het touwtje om de tampon te verwijderen kan desgewenst worden vastgeplakt met een huidvriendelijke pleister.
- De tampon kan tot maximaal **20 uur** blijven zitten.
- Tijdens zwemmen mag de tampon blijven zitten.
- U hoeft de tampon niet te verwijderen als u het toilet bezoekt om te plassen.

De tampon niet gebruiken bij:

- Bloedingen zonder duidelijke oorzaak.
- Acute infecties in het gebied van de vagina.
- Onbekende pijn in de buik.

Neven effect:

Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van de tampon een licht drukgevoel ervaart. Normaal gesproken verdwijnt dat gevoel na 3-4 dagen gebruik of na verwijderen van de tampon.

Waarschuwing:

Indien u tijdens het gebruik van de tampon symptomen heeft als koorts, diarree, overgeven, duizeligheid en/of huiduitslag, verwijdert u de tampon dan direct en neem contact op met uw huisarts.

De tampon is geschikt voor éénmalig gebruik.

Wegwerpen:

Spoel RECA care niet door het toilet. De tampon mag, eventueel gerold in toiletpapier of tissue, worden afgevoerd met het huishoudelijk restafval.



Lees deze instructie zorgvuldig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij onzorgvuldig gebruik van dit product.



Eenmalig gebruik



Fabrikant:
RECA MED
Gustav-Schickedanz-Str. 8
90762 Fürth
Germany

In Nederland verkocht door:
Pelvitec B.V.
Rotterdamseweg 183-C
2629 HD Delft
Tel.: 010 - 303 22 90
Internet: www.pelvitec.com

FRM-3-017-03