

Leg de procedure uit aan de patiënt en zorg dat deze zo ontspannen mogelijk ligt.

1. Haal de scanner van de console en activeer daarmee het systeem.
  - \* Het display toont de resultaten van de laatste 4 patiënten, een bluetooth icoon en de batterijstatus.
  - \* Blauwe lichtjes in de scanner geven aan dat er connectie is met de console.
  - \* De luchtbel in de scanner is normaal.
2. Breng voldoende gel voor de gehele lengte van de scanner aan, tussen het os pubis en de navel.
  - \* Voldoende gel is belangrijk voor een accurate meting.
3. Plaats de scanner op de buik en zorg dat de gel gelijkmatig verdeeld is over de gehele lengte van de scanner.
  - \* Oefen voldoende druk uit.
  - \* Druk het witte deel van de scanner in het weefsel zodat alleen het zwarte frame zichtbaar blijft
4. Houd het handvat loodrecht op de buik van de patiënt, met de schakelaar richting zijn/haar voeten.
5. Druk op de knop en laat deze los om de scan te starten.
  - \* De scanner lokaliseert automatisch de blaas.
  - \* De druk pas laten afnemen als de scanner stopt met draaien (< 2 seconden).
  - \* Het volume verschijnt op het display.Als de blaas zich binnen het gezichtsveld bevindt dan zal de rand om het raster **groen** zijn.
6. Reinig de scanner en hang deze terug in de console.



**Belangrijk: de afstand tussen console en scanner mag niet meer dan 10 meter bedragen.**

rev.1 - 2019