

PACEY CUFF ULTRA: VOOR URINEVERLIES BIJ MANNEN

Pacey Cuff Ultra is geen klem maar een instelbare manchet die door het ergonomische ontwerp alleen druk uitoefent op de urethra en niet op de bloedvoorziening van de penis. Hierdoor wordt lekkage van urine voorkomen of sterk verminderd zonder het belemmeren van de bloedcirculatie. Dit in tegenstelling tot traditionele klemmen die de penis afknellen.



De gebruikte duurzame materialen zijn sterk maar toch zacht voor meer comfort. In ieder doosje wordt tevens een power sleeve meegeleverd voor nog betere resultaten.



Pacey Cuff Ultra is verkrijgbaar in 3 maten (S,M,L). Gebruik de maattabel om de juiste maat te selecteren.

Iedere maat is verder in te stellen naar individuele behoefte via de verstelbare onderkant. Een kleine aanpassing kan al een groot verschil maken. Een nieuwe gebruiker zal 2-4 dagen nodig hebben om de meest comfortabele instelling te vinden en optimaal gebruik te kunnen maken van het hulpmiddel.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De Pacey Cuff Ultra is bedoeld als hulpmiddel voor urinecontinentie bij mannen en kan worden gebruikt om urineverlies te voorkomen of verminderen zonder de bloedsomloop te beperken. De Pacey Cuff Ultra wordt gebruikt tijdens de uren dat men wakker is. Een lichte pad kan indien gewenst worden gecombineerd met dit hulpmiddel.

ONDERDELEN



Power Sleeve - Bedoeld voor gebruik met het Pacey Cuff-apparaat om het geheel beter te kunnen afstellen.



GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. De Power Sleeve bevestigen en de Pacey Cuff er overheen plaatsen.


- Sla voordat u de manchet aanbrengt de Power Sleeve om het midden van de penis
- De Power Sleeve moet goed aansluiten en de uiteinden moeten met elkaar verbonden worden.
- Sluit het klittenband en let erop dat de sluiting aan de zijkant van de penis is geïmponeerd.
- Breng minder strak aan als de Power Sleeve oncomfortabel aanvoelt.
- Schuif de Pacey Cuff Ultra over de Power Sleeve.



Belangrijk: rek de Power Sleeve niet teveel uit

2. De Pacey Cuff bevestigen

- Let erop dat het drukkusje van de manchet aan de onderzijde van de penis is geplaatst [aan de onderzijde loopt de urethra (= plasbuis)].
- Knijp met uw dominante hand de bovenzijde en onderzijde van de penis naar elkaar toe om voldoende compressie te krijgen voor het stoppen van de urinestroom. **Gebruik uw hand en niet het bandje om de Pacey Cuff ultra samen te drukken!**

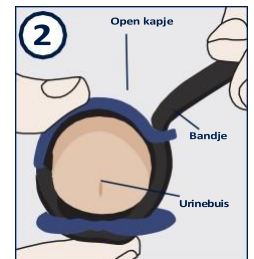

3. De Pacey Cuff vastmaken

- Maak het resterende bandje vast. Het kapje van de manchet zit nu aan de bovenzijde en het drukkusje aan de onderzijde van de penis. Let erop dat er geen huid tussen de onderdelen gekneld zit.



Belangrijk: Om de juiste druk te bepalen moet u mogelijk de klittenband sluiting een paar keer losmaken en opnieuw vastmaken. Het vinden van de juiste compressie vergt enige oefening.

Heeft u de juiste positie gevonden, kijk dan op de bovenzijde naar de positie van de cijfers op het bandje. Dit helpt u om een volgend keer sneller de juiste instelling te vinden.



ALS HET LEKKEN AANHOUDT

Behalve het bovenste bandje is ook het onderste gedeelte verstelbaar. Schuif naar links of rechts om de manchet beter te laten passen. Een mm kan al verschil maken ten aanzien van urineverlies en/of comfort.

Als zich na het eerste gebruik lekken voordoen:

- Het onderste bandje moet standaard op 3 zijn ingesteld.
- Schuif bij urineverlies het onderste bandje naar een hogere stand (3.5-4)



AANBEVOLEN

- Gebruik strak, nauw aansluitend ondergoed in plaats van losse boxershorts.
- Tegen mogelijke huidirritatie kan vaseline worden gebruikt
- De manchet kan tijdens het sporten en zwemmen worden gedragen, na gebruik goed drogen.

REINIGEN:

Was de Pacey Cuff Ultra en de Power Sleeve in warm water en laat goed drogen. Er mag een milde zeep worden gebruikt die vrij is van hydraterende middelen, parfums, deodorants, conserveermiddelen, detergenten of kleurstoffen. Niet in de wasdroger drogen.

PLASSEN:

De fabrikant geeft aan dat de Power Sleeve tijdens het plassen niet noodzakelijk verwijderd hoeft te worden. Bij het plassen kunt u het anti-knel-lipje van de Pacey Cuff Ultra losmaken en de manchet opnieuw vastmaken zodra de blaas leeg is. Plas elke 1 à 2 uur leeg en zorg voor een beperkte drankinname. Soms adviseren hulpverleners om de Pacey Cuff Ultra wél even te verwijderen en de manchet daarna weer te bevestigen.

VERVANGING VAN HET PRODUCT:

Pacey Medtech raadt aan om het hulpmiddel om de 4-6 maanden zo nodig te vervangen









WAARSCHUWINGEN: ⚠

- Verwijder de Pacey Cuff als pijn, zwelling, bloeding of ongemak optreedt.
- Gebruik het hulpmiddel onder professionele supervisie als de patiënt speciale behoeften heeft.
- Gebruik het hulpmiddel niet als u medicijnen gebruikt die uw vermogens nadelig beïnvloeden.
- Als de huid geïrriteerd raakt, stop dan met het gebruik totdat de irritatie is verdwenen.
- Mechanische krachten die de positie van de Pacey Cuff verdraaien of veranderen, kunnen pijn veroorzaken. Als dit gebeurt, verwijder dan de Pacey Cuff en laat de bloedtoevoer terugkeren. Raadpleeg uw arts als de pijn niet verdwijnt.

• De Power Sleeve is niet MR-compatibel.


Raadpleeg een arts als de volgende aandoeningen aanwezig zijn:

- Omstandigheden die abnormale bloedstolling veroorzaken. Aandoeningen die de bloedstolling verstoren en aandoeningen die bloed stollen, zoals coagulopathie. Een verhoogde bloedstolling kan aangeboren en / of verworven zijn.
- Geneesmiddelen die pijnherkenning verminderen (bijv. verdovende middelen en slaapmiddelen).
- Geneesmiddelen die de stolling verminderen en geneesmiddelen die de stolling verhogen.
- Aandoeningen zoals sikkcelziekte die een langzame bloedstroom en stolselvorming veroorzaken.
- Raadpleeg uw arts bij ernstige medische aandoeningen.
- Voor gevorderde perifere of cardiale vasculaire aandoeningen of diabetes mellitus, dient u voor gebruik uw arts of medische zorgverlener te raadplegen.
- Raadpleeg voor gebruik uw arts of medische zorgverlener als u een urineweginfectie (UTI) heeft.

Symbol	Definitie
	Fabrikant
	Bevoegde vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Batchcode
	CE-markering
	Productcode
	MR Unsafe (uitsluitend Power Sleeve)
	Waarschuwingen

 Pacey MedTech Ltd.

203 - 1099 West 8th Avenue
 Vancouver, BC Canada V6H 1C3
Telefoon: + 1-877-377-2239
 info@paceymedtech.com
 paceycuff.com


 Medical Device Safety Service GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Duitsland

Alle patenten zijn aangevraagd. Pacey manchet™ is een geregistreerd handelsmerk van Pacey Medtech Ltd.

Vertegenwoordiging in Nederland:

Pelvitec bv
 Rotterdamseweg 183-C
 2629 HD Delft
 Tel: +31 (0)10 3032290
 e-mail: info@pelvitec.nl

NB. Deze handleiding is geen vervanging van de officiële instructie van de fabrikant.